

클래시스

SHURINK UNIVERSE

정밀하고 범용적인 Skin Rejuvenation 기기 임상 리뷰



글/Dr. Anesia Tania(Riclinic & Jade Aesthetic Clinic)



피부과 전문의로서 monopolar RF, 시각화 기능이 탑재된 MMFU(Micro Macro Focused Ultrasound), microneedle RF, laser 등 다양한 에너지 기반 기기를 사용해 왔다. 그중 SHURINK UNIVERSE는 정밀성, 범용성, 그리고 임상적 효능 측면에서 단연 두각을 나타냈다. SHURINK UNIVERSE를 진료에 도입하고 최근 몇 개월 동안 지방층을 포함한 다양한 깊이 타기팅과 다형 카트리지를 활용한 개인 맞춤 치료의 효과를 직접 확인할 수 있었다.

제품 소개 및 특징

SHURINK UNIVERSE는 단순히 업그레이드된 HIFU 기기를 넘어 비침습적 지방 감소와 피부 타이팅, 윤곽 개선 분야에서 기술의 패러다임을 전환한 기기다. SHURINK UNIVERSE는 micro 및 macro HIFU에

너지를 동시에 전달할 수 있어, 얼굴과 신체 부위 모두에 정밀한 맞춤치료가 가능하다. 특히 micro pulse technology(MP 모드)는 기존 기기 대비 통증을 크게 줄이면서도 균일한 열 분포를 제공해 시술 내약성을 높였다. 빠른 에너지 전달 속도는 시술 시간을 단축시키고 환자들은 시술 직후 바로 일상생활로 복귀할 수 있다. 에너지 기반 기기를 사용할 때 지방 손실이 발생할 수 있다는 점은 오랫동안 알려져 왔지만, 일부 기기는 이를 간과하거나 사용자 오류로만 치부했다. 반면, SHURINK UNIVERSE는 지방층을 적극적으로 타기팅할 수 있도록 설계되었으며 시술자의 조정 가능성을 넓혀 얼굴과 신체 윤곽을 효과적으로 개선할 수 있다. 6.0mm 카트리지를 통해 하안면 및 턱선의 윤곽과 탄력을 동시에 개선할 수 있다. 정밀한 깊이 조절로 주사나 수술 없이도 이중턱 지방 감소에 효과적이며, 지방 흡

입을 원치 않는 환자의 복부, 옆구리, 팔의 지방을 줄이는 비침습적 대안으로도 적합하다.

다중 깊이 및 다형 카트리지의 장점

SHURINK UNIVERSE는 1.5mm부터 13mm까지 다양한 깊이의 카트리지를 제공하며, 각기 다른 피부 상태와 부위에 따라 최적의 치료가 가능하다.

1.5mm·2.0mm : 눈가, 이마의 잔주름 및 표재성 탄력 개선
3.0mm·4.5mm : 콜라겐 재형성과 SMAS층 리프팅
6.0mm·9.0mm·13.0mm : 피하지방을 안전하게 타기팅하여 얼굴과 신체 윤곽 개선. 또한, 두 가지 에너지 모드(Normal, MP)를 선택할 수 있어, 치료 목표에 맞춰 더 정밀한 접근이 가능

Normal 모드 : 정밀한 열 응고점이 필요한 타이팅에 적합

MP 모드 : 균일한 가열이 가능하며 지방 감소 및 경미한 피부 처짐에 효과적

Ultraboost 핸드피스 : 하안면 등 접근이 어려운 부위의 정확한 시술 가능

임상 사례 및 결과

첫 번째 케이스는 35세 환자로 턱선에 초기 처짐과 볼의 경미한 처짐이 확인되었다. 하안면 윤곽 조절을 목표로 4.5mm, 3.0mm를 활용하여 Normal 모드와 MP 모드로 시술을 진행하였다. 그 결과 6주 후 턱선이 정교해졌다. 다운타입은 없었다.

〈그림 1〉은 45세 환자로 턱말에 지방이 있었고 턱선이 비대칭했다. 피부는 경미하게 이완되어 있었다. 비수술적 이중턱 감소를 목표로 6.0mm, 4.5mm, 3.0mm를 활용하여 MP 모



그림 1. SHURINK UNIVERSE 시술 전후, Dr. Anesia Tania 제공.



그림 2. SHURINK UNIVERSE 시술 전후, Dr. Anesia Tania 제공.

드를, 4.5mm, 3.0mm를 사용하여 Normal 모드를 진행하였고 6주 후 이중턱이 뚜렷하게 감소하여 턱선이 개선되었다. 45세 환자인 〈그림 2〉도 〈그림 1〉과 같은 문제점을 가지고 있었다. 마찬가지로 비수술적 이중턱 감소를 목표로 턱말 지방, 비대칭한 턱선, 경미하게 이완된 피부를 개선하였다. 치료는 MP 모드로 6.0mm, 4.5mm, 3.0mm 카트리지를, Normal 모드로 4.5mm, 3.0mm 카트리지를 사용하여 진행했다. 6주 후 이중턱의 감소하였고 턱선이 개선되었다. SHURINK UNIVERSE는 지방 감소와 피부 타이팅을 동시에 달성할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공한다. 시술의 정밀성, 환자의 편안함, 짧은 회복 시간, 그리고 다양한 임상 적용 가능성은 나의 진료에 큰 가치를 더했다. 미용의학 시술을 통해 외모 개선 효과와 삶의 질 개선까지 추구하는 현대에 SHURINK UNIVERSE는 비침습적 skin rejuvenation 영역에서 활용 가능성과 가치가 큰 기기라고 생각한다.